

TOSI® - LumCheck- trubicový test

Chemický test pro kontrolu účinnosti mytí a čištění dutých nástrojů (laparoskopů, pevných endoskopů) v mycích a dezinfekčních zařízeních (MDZ).

<u>NÁZEV VÝROBKU</u>	<u>POČET KUSŮ V BALENÍ</u>	<u>KATALOGOVÉ ČÍSLO</u>
TOSI®-LumCheck - test	25 indikátorů	8303
TOSI®-LumCheck - test device	nerezová trubice s pouzdem na test - 1kus	8305
TOSI®-LumCheck Starter-Set	2 x 8303 + 1 x 8305	8306

POPIS A PRINCIP TESTU:

Kovová testovací jednotka se připojuje na trysku mycích strojů a simuluje proud vody v dutém tělese. Testovací jednotka se skládá z trubice a nerezové destičky s červenou testovací skvrnou. Testovací skvrna je patentována (EP 0886778B1), splňuje požadavky na standardizaci a skládá se z hemoglobinu, albuminu, fibrinogenu a trombinu. Destička se vkládá do trubice, která simuluje čištěný dutý nástroj. Destička omezuje víření vody po povrchu trubice a tím simuluje ztížení procesu mytí uvnitř dutých nástrojů.

Indikátor TOSI®-LumCheck splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 15883.


POUŽITÍ:

Rozšroubujte kovovou testovací jednotku a oddělte obě části od sebe.

Vyjměte v místě perforace z ochranné fólie opatrně testovací destičku/test/ tak, abyste se nedotkli testovací skvrny.

Vložte test do části testovací jednotky s užším průměrem, zašroubujte a připojte na trysku MDZ. Tu naplňte jako obvykle a odstartujte program.

Po skončení programu vyjměte testovací jednotku, rozšroubujte a vyjměte test.

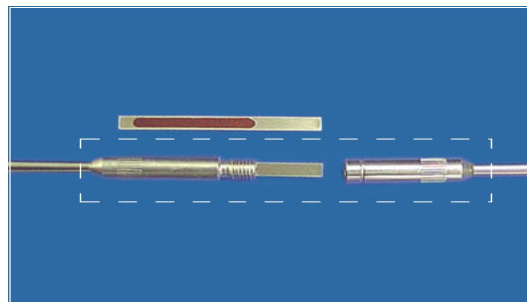

VYHODNOCENÍ TESTU:

Vyhovující výsledek: Na povrchu testu TOSI®-LumCheck nejsou žádná viditelná rezidua, tudíž se jedná o perfektní účinnost mycího, resp. čistícího procesu.

Nevyhovující výsledek: Na povrchu testu jsou viditelné zbytky fibrinu a/nebo krve. **K vyhodnocení použijte tabulku „TOSI - stručný průvodce řešením problémů při procesu mytí“.**

SKLADOVÁNÍ: v uzavřené ochranné folii při pokojové teplotě 2 až 25 °C, mimo dosah dezinfekčních prostředků a chemických látek v plynném skupenství.

EXPIRACE: 1,5 roku od data výroby.

MOŽNOST VYZKOUŠENÍ A ZAPŮJČENÍ

RÁDI BYSTE KONTROLOVALI VAŠE MDZ, ALE NEJSTE SI JISTI ZDA JE PRO VÁS NÁŠ
INDIKÁTOR VHODNÝ? RÁDI VÁM INDIKÁTOR ZAPŮJČÍME K VYZKOUŠENÍ.

Pro více informací kontaktujte naše obchodní zástupce.